

Notice d'utilisation : Masque en tissu sans couture catégorie 2

Afin de faire face au plus vite à la demande importante du grand public, des municipalités et des entreprises pour préparer le déconfinement, l'entreprise SAFAR a travaillé sur la création d'un masque facile à produire en grande quantité et à un prix tout à fait abordable.

Ce masque antiprojection est réalisé en tissu 100% Polyester en double épaisseur.

Lavable en machine à 40 ou 50°C ou au savon et à l'eau, ce masque en tissu Polyester a l'avantage de sécher très vite et est réutilisable de nombreuses fois.

Ce masque en tissu permet aux personnes qui les portent de ne pas contaminer d'autres personnes par la projection de leurs postillons.

Pour protéger vos contacts, il convient d'insérer entre les 2 couches de tissu, une protection supplémentaire soit un mouchoir en papier soit un morceau de tissu molletonné synthétique comme par exemple du tissu de type micro polaire ou coton. Il est bien entendu que cette 3^{ème} couche est soit à remplacer soit à laver régulièrement.

Ce masque s'enfile autour des oreilles et s'ajuste parfaitement sur le nez et la bouche.

Pour un usage tout au long de la journée, il est préconisé de le laver ou le changer toutes les 4 heures, en même temps que la couche intérieure.

En aucun cas, le masque ne doit présenter des signes d'humidité, dès lors il convient de le remplacer.

Attention :

Ces masques sont de catégorie 2 et donc ne constituent en rien une protection homologuée contre les virus, et ne se substituent pas aux masques chirurgicaux ou masques filtrants FFP2 réservés aux professionnels qui interviennent auprès de personnes avérées positives Covid 19. Ces masques sont à utiliser auprès de personnes non suspectes pour les préserver de toute contamination.

Il est important de rappeler de respecter les mesures de protection et de sécurité établies par les autorités sanitaires et le gouvernement, car c'est seulement si nous agissons tous ensemble en toute responsabilité que nous pourrions surmonter ce défi.

Consignes d'utilisation du masque en tissu :

Durée d'utilisation limitée à 4h maximum :

II EST IMPORTANT DE RAPPELER QUE CE PRODUIT NE DOIT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERE COMME UNE PROTECTION ANTI VIRALE

Vous devez mettre votre masque lorsque vous sortez à l'extérieur, et le retirer bien entendu lorsque vous rentrez chez vous, en le prenant par les côtés et en évitant la bouche.

- Laver impérativement les masques avant la 1^{ère} utilisation en machine à 40 ou 50°C ou au savon et à l'eau
- Lavage quotidien, des masques et du tissu molletonné intérieur avant chaque nouvel usage, en machine à 40 ou 50°C ou au savon et à l'eau. Remplacer le mouchoir intérieur quotidiennement si vous utilisez cette matière.
- Après le lavage, attendre que le masque et tissu molletonné intérieur soient complètement secs avant de les utiliser :

En effet une humidité stagnante dans le masque augmentera les risques de contamination

- Se laver très soigneusement les mains au savon ou au gel hydroalcoolique avant toute manipulation : avant de les mettre mais aussi avant de les enlever,
- Il n'est pas utile de le repasser, mais vous pouvez le faire à température extrêmement douce (fer en position «soie» ou «laine»), les virus n'aimant pas la chaleur,
- S'attacher les cheveux avant de mettre le masque pour ne plus avoir à approcher les mains de son visage,
- Une fois le masque en tissu en place autour des oreilles, du nez et de la bouche, il ne faut plus le toucher ainsi que son visage,
- **ATTENTION : Ne jamais garder un masque humide sur le visage**
Vous devez toujours avoir les mains lavées au savon pour toute manipulation des masques, et ne jamais mélanger les masques propres avec les sales.

MASQUE EN TISSU CATEGORIE 2



Composition : 100% polyester

2 tailles existantes :

modèle M : L 33,5 cm x H 14 cm

modèle L : L 36,5 cm x H 14 cm

Etape 1




Masque à plat.

Etape 2

Mise en place obligatoire d'un tissu molletonné ou mouchoir en papier au centre du masque :

- carré de coton
- mouchoir en papier
- carré de tissu synthétique de type micro polaire

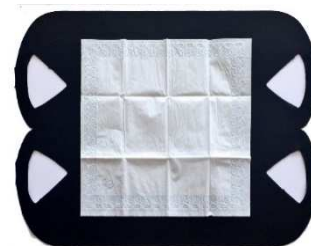

Dimensions du tissu molletonné minimum : 21 x 21 cm


Etape 3

Masque et tissu molletonné ou mouchoir plié en 2 prêt à être porté



Etape 4

Tourner l'extrémité dans le sens des aiguilles d'une montre, pour introduire votre oreille dans l'orifice prévu pour le maintien du masque.

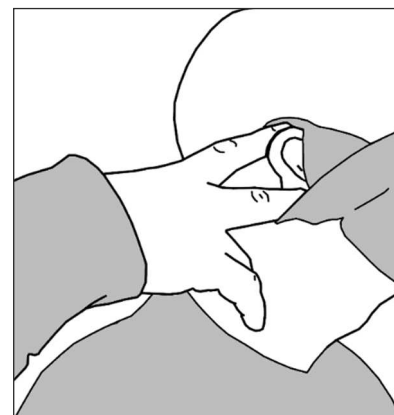

Le masque présenté est de taille L.

Performances : Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.

- **Masque catégorie 1** : « UNS 1 » = masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.
Efficacité de filtration des particules de $3\mu\text{m}$ > 90%.
Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > $96 \text{ L/m}^2\cdot\text{s}^{-1}$ pour une dépression de 100 Pa
- **Masque catégorie 2** : « UNS 2 » = masque de protection à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques.
Efficacité de filtration des particules de $3\mu\text{m}$ > 70%.
Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > $96 \text{ L/m}^2\cdot\text{s}^{-1}$ pour une dépression de 100 Pa

SASU ETABLISSEMENT SAFAR au capital de 39 000€
30 Boulevard des Saulniers – CS 37086 – 35370 Argentré du Plessis – France
SIRET 719 200 503 00014 – APE 1392Z
www.safarauto.com – www.maisondelahousse.com